

E-SAFE Entsorgungsbehälter Universal A

0.6 l



2.0



3.0 l



7,0 l



SRM Bestell Nr.

4011576

4011577


4011578

4012985

Deckelmontage 0,6l – 7,0 l


Den Deckel auf den Rücken legen und den Behälter so fest aufdrücken, bis alle Rastnasen am Behälterrand hör- und sichtbar eingerastet sind.

1

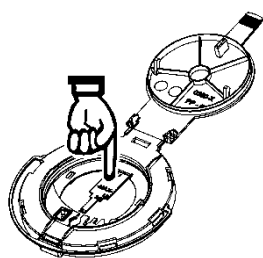


2

KLICK!

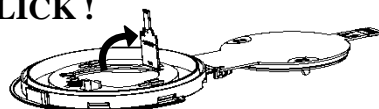

3

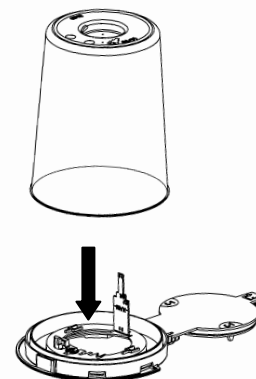

Anwendung Füllhöhenanzeige

Bevor der E-SAFE auf den Deckel gedrückt wird, muss der Füllhöhenanzeiger aufgeklappt und sicher eingerastet werden. Die jeweilige Füllhöhe wird durch die, im Symbol (X.X) am Boxenboden angegebene Grösse, abgelesen. Bis zu dieser Angabe darf der E-SAFE befüllt werden.

Spritzen und Pen-Abziehvorrichtungen

Die in der Abwurföffnung befindlichen Vorrichtungen beinhalten, neben Abziehkerben für Spritzen, eine Abschrauböffnung für Insulinpens. Unter leichtem Verschluss des Tagesdeckels drückt die Nase im Deckelboden den Pen aus dem Abdrehkranz in den Behälter.

Skalpellklingen-Abzug



Das Skalpell wird senkrecht in den schmalen Schlitz mit der geschlossenen Seite gedrückt, damit die Klinge abfällt.

E-SAFE Universal A 0,6 l / 2,0 l / 3,0 l / 7,0 l

Tages- und Transport-Verschluss

Die Deckellasche am Deckel verfügt über zwei Funktionen:

1. Erleichtert das Öffnen des Tagesverschlusses.
2. Sichert nach Umlegen und Einrasten ein ungewolltes Öffnen des Deckels bei der Entsorgung.
Beim E-SAFE muss nach Einrasten des Entsorgungsverchlusses der Deckel bis auf die Höhe der Aussparungen am umlaufenden Rand eingedrückt werden.

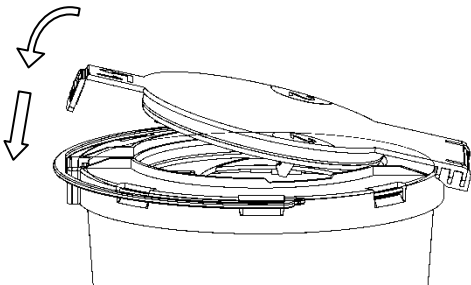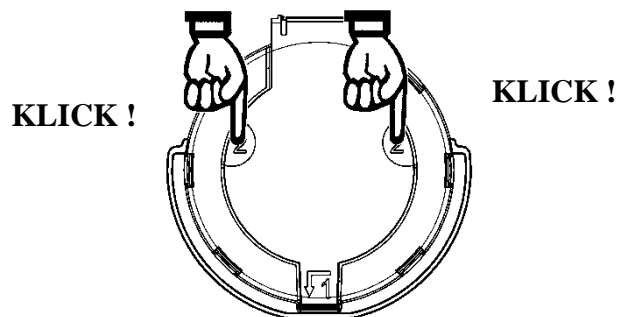1

2


MOVIX Haftadapter



E-Safe 600 ml
Bestell Nr: 4011584

E-Safe 2 l / 3 l
Bestell Nr: 4044585

Der Adapter mit latexfreiem Haftgummi sorgt für sicheren Stand der E-SAFE Boxen/Behälter an wechselnden Einsatzorten.

Der MOVIX wird am Boden des E-SAFE im Uhrzeigersinn festgedreht. Der Adapter sichert bei Abstellen auf eine vorgereinigte glatte Fläche den Behälter beim Abwurf gegen ungewolltes Umfallen.

Entfernen des Adapters: Der Haftgummi lässt sich vom Untergrund wieder Ablösen, wenn der schwarze Pin nach vorne gedrückt wird.

Haftungsbeeinträchtigung: Sollte die Haftung nachlassen, bitte die Gummifolie nur am Rand leicht nach unten drücken und evtl. zur Entfernung von Schmutzpartikel unter klarem Wasser abspülen. Danach ist die Haftwirkung hergestellt.