



Desinfektionsplan, Bettenzentrale, STGAG

Allgemeines

Der Desinfektionsplan dient als Übersicht für die Aufbereitung rund um das Patientenbett in der Bettenzentrale. Auf die Erwähnung der Zuständigkeit wurde weitgehend verzichtet, da in der Regel verschiedene Personen die Desinfektionsmassnahmen ausführen.

Weitere Informationen sind in den folgenden Richtlinien in den Guidelines zu finden:

- [Flächendesinfektion](#)
- [Desinfektionsmittelliste](#)

Gegenstand	Häufigkeit	Mittel / Art	Spezielles	
	Bettgestell und Haltebügel	Nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Matratze	Nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Deckbett Kopfkissen Lagerungsmaterial waschbar	Bei Verschmutzung Bei stark schwitzenden Patienten Nach Kontaktisolation (z.B. MRSA, Noroviren)	In Wäscherei geben	Gemäss Merkblatt Bettenaufbereitung: KSM / KSF ab Einführung des „All in One“
	<u>Nicht</u> waschbar		Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Schaumstoff roh	Nach Gebrauch	KSF: autoklavieren	
	Corpoform – Matratze KSF	Bei Verschmutzung Nach Kontamination	Waschen Waschen	
	Airsoft-Matratzen-Überzüge KSM	Bei Verschmutzung	In Wäscherei geben	
	Quatro-Matratzen KSM	Nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Sauberes, aufbereitetes Bett	Bis zum Gebrauch	Plastiküberzug darüberlegen	Staubfrei!
	Notfallbetten	Jede 2. Woche	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Pathologiebett	Nach Gebrauch	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen
	Textile Bettgitter	Nach Gebrauch	Waschen	
	Rollstuhl, Boys etc.	2 mal jährlich	Kohrsolin® FF 0,5%	Abreiben und trocknen lassen Räder periodisch reinigen

Autor
Spitalhygiene

Erstversion
1.1, August 2008

Überarbeitung Spitalhygiene
Version 2.1, 2018