


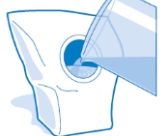







**Safe&Easy - Bag in Box System, Wischtuchsystem zur Flächendesinfektion**
**Befüllungsanleitung**

	<p><b>Schritt 1</b> Zum Personalschutz sowie zum Schutz der Wipes Safe&amp;Easy: Desinfizieren Sie die Arbeitsfläche und ihre Hände, tragen Sie Handschuhe und eine Schutzbrille (Gemäss TRBA 250, Absatz 4.1.3)</p>
	<p><b>Schritt 2</b> Öffnen Sie das selbsthaftende Siegetikett des Bag Systems. Auf hygienisches Arbeiten achten. Handschuhe nicht während der Arbeit kontaminieren!</p>
	<p><b>Schritt 3</b> Kleben Sie das Siegetikett auf die dafür vorgesehene Seite der Spenderbox.</p>
	<p><b>Schritt 4</b> Füllen Sie das Siegetikett an der Seite der leeren Spenderbox vollständig aus</p>
	<p><b>Schritt 5</b> Ziehen Sie das innerste Tuch der Rolle ein Stück Heraus, giessen Sie <b>2.5 Liter</b> gebrauchsfertige Desinfektionsmittellösung (STGAG-Regelung) langsam über die Tuchrollen im Bag.</p>
	<p><b>Schritt 6</b> Setzen Sie den Deckel auf die Bagöffnung und ziehen Sie das innerste Tuch der Tuchrolle in die sternenförmige Entnahmeöffnung des Verschlusses.</p>
	<p><b>Schritt 7</b> Verschrauben Sie den Verschluss mit dem Bag.</p>
	<p><b>Schritt 8</b> Setzen sie den Bag in die Spenderbox ein.</p>
	<p><b>Schritt 9</b> Befestigen Sie den Deckel mit der Spenderbox.</p>
	<p><b>Schritt 10</b> Verwerfen Sie das erste Tuch und verschliessen Sie die Schutzkappe des Verschlusses sorgfältig. Die Tücher sind nach 30 Minuten Wartezeit vollständig durchtränkt.</p>